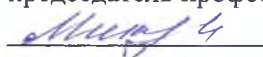

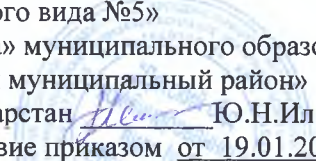


**СОГЛАСОВАНО:**

председатель профсоюзного комитета  
 Н.Н.Микулова  
протокол №1 от 19.01.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

заведующий муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад  
комбинированного вида №5»  
г. Лениногорска» муниципального образования  
«Лениногорский муниципальный район»  
Республики Татарстан  Ю.Н.Илюхина  
Введено в действие приказом от 19.01.2015 №7-ОД

**Инструкция  
(№15)**

**по охране труда при работе с гальванизатором «Поток – 1»**

**1. Назначение аппарата**

Аппарат предназначен для воздействия постоянным током на организм человека с лечебными и профилактическими целями, а так же для проведения лекарственного электрофореза. Аппарат предназначен для применения в физиотерапевтических кабинетах.

**2. Технические характеристики**

2.1 Аппарат должен обеспечивать плавно регулируемый от нуля до максимального значения постоянный ток в цепи пациента. Максимальное значение тока должно быть на выходе (50+-5)мА при нагрузке (500+-50)Ом.

2.2 Аппарат имеет два переключаемых диапазона установки тока в цепи пациента:

-от 0 до 5мА;

-от 0 до 50мА

и индикатор тока пациента.

2.2.Аппарат имеет электрическое блокирующее устройство, исключающее появление тока в цепи пациента при включении аппарата и переключение диапазонов тока, если установлено ненулевое значение тока пациента.

2.3Аппарат имеет процедурный таймер, позволяющий устанавливать длительность процедуры от 1 до 99минут с дискретностью 1 минута. Погрешность отсчета времени процедуры не превышает +-2с в минуту.

Своевременно проверять исправность аппарата и целостность изоляции электрических проводов, заземления.

**3. Требования по окончанию работы.**

. После окончания процедуры выключается аппарат, затем снимают с больного электроды. По окончании рабочего времени аппарат отключают от сети.

Инструкцию разработал:  
заместитель заведующей по АХЧ:



Микулова Н.Н.